

Ordre des tubes à prélever :



1 tube bleu si :
INR-TP-TCA-FIB
D-Dimères
Héparinémie (HBPM)

2 tubes bleu en + :
Anti coagulant circulant - Labo
Facteurs de la coagulation - Labo

1 tube bleu en + :
*AT3 / Antithrombine 3

1 tube jaune :
ACE
AFP
CA125
CA15-3
CA19-9
Cortisol
Digoxine
Hépatite A - IgM et Ac totaux
Hépatite B - Ac anti HBc
Hépatite B - Ac anti HBs
Hépatite B - Ag HBs
Hépatite C - HCV
HIV
Insuline - A jeun
PSA
PSA libre
Rubeole IgG
Toxo IgM et IgG

Prélever 1 tube jaune en + :
*Alpha 2 Macroglobuline
*Ac anti ADN - ENA
*Ac anti CCP - ACCP
*Ac anti Cellules pariétales
*Ac anti cytopl des PN - ANCA
*Ac anti Nucléaires
*Ac anti récepteur TSH
*Ac anti transglutaminase IgA
*Ac antitétanique
*Acides biliaires - A jeun
*ASD
*ASL
*AMH
*Beta 2 Micro Globuline BARLA
*C3
*C4
*Calcitonine - Labo
*CLA (Mixte-pneuma-tropha)
*CH50 - Labo
*Delta 4 androsténédione
*Dépakine / Ac Valproïque
*Fibrotest
*HCG Enfant - Labo
*HCG homme - Labo
*IgE
*Lithium sérique
*Orosomucoïde
*Peptide C
*Phadiatop / Trophatop
*RAST / Allergènes
*Séro Chlamydiae pneumoniae
*Séro Chlamydiae Tracho IgG
*Sérologie Lyme
*Thyroglobuline

Prélever 1 tube jaune en + :
*Avidité Toxo IgG
CMV IgG
CMV IgM
Sérologie EBV (EBNA+VCAg+VCAM)
Sérologie Hépatite E IgM
Sérologie Covid IgG
*Sérologie Hélicobacter Pylori
*Sérologie Herpès IgG HSV
Syphilis/BW/TPHA
*Sulfate de DHEA
*Testostérone - A jeun
*Tégréto / Carbamazépine

Prélever 1 tube jaune en + :
CDT
FR Facteur Rhumatoïde
Electrophorèse des protéines
Immunofixation
Préalbumine
Procalcitonine

Prélever 2 PETITS tubes jaune en + :
Trisomie 21

1 tube rouge :
*Cryoglobuline (2 tubes) - Labo A jeun
*Cuivre
*Lamotrigine
*Vitamine A - Labo - ☁
*Zinc

1 seul tube vert :
Acide Urique
Albumine
ALT/GPT
Amylase
Anti Thyroglobuline II - ATG
Anti Thyroperoxydase - ATPO
AST/GOT
Bilan lipidique
Bilirubine Directe
Bilirubine Totale
b-HCG Totale
Calcium
Cholestérol
Coefficient Saturation Transferrine
CPK (Créatine Kinase)
CL
Créatinine
CRP / CRP us
Estradiol - E2
Fer
Ferritine
Folates / Vitamine B9
FSH
GGT
Haptoglobine
HDL Cholestérol
Immunoglobuline A
Immunoglobuline G
Immunoglobuline M
K
LDH
LDL
LH

1 tube vert :
Lipase
Magnésium
NA
PAL
Phosphore
Proteines Totales
Progestérone
Prolactine ☞ 20 min
NT ProBnp
Parathormone - PTH
Réserve alcaline - RA
T3 Libre
T4 libre
Transferrine
Troponine I
Triglycérides - A jeun
TSH ultra-Sensible
Urée
Vitamine B12
Vitamine D (25OH D3)

1 tube vert sans gel en + :
*Sérotonine - à congeler Labo - Labo
*Magnésium érythrocytaire
*Quantiféron (2 tubes) - Labo
*Vitamine C - Labo

XXXX : Examens d'urgence
XXXX : Conservés 1 an au labo
Labo : Prélèvement Labo recommandé
A jeun : A prélever à jeun
 * = Examens transmis
 ☁ = Tube à l'abris de la lumière
 ☞ = après repos

1 tube violet si :
Groupe sanguin (2 tubes) (+CNI)
RAI (+CNI)
*Coombs direct - Kleihauer
1 tube en + :
HBA1c / Hémoglobine glyquée
1 tube en + :
*Aldostérone - Labo
*Ammoniémie - glace - Labo
*Ciclosporine
*Everolimus
*Rénine - Labo
*Sirolimus
*Tacrolimus / FK506 / Prograf
*Vitamine B1 Labo - ☁
*Vitamine B2 - Labo
*Vitamine B6 Labo - ☁
*Vitamine B9 Erythrocytaire + NFS
*Lithium érythrocytaire
*Uracémie (Phéno DPD) - Labo

1 tube en + : EDTA avec gel
*Homocystéine - glace - Labo
*Charge virale Hépatite B
*Charge virale Hépatite C (2 tubes)
*Charge virale HIV
*CROSS LAPS - A jeun

1 tube rose si :
NF - Plaquettes - VS
Réticulocytes
Schizocytes
Cellules de Sezary
Recherche de Paludisme

1 tube gris :
Glucose / Glycémie - A jeun
Ethanol / Alcool

Tube rose + Aprotinine
*ACTH - à congeler au labo - Labo